



## GEHOORBESCHERMING REINIGINGSSET

Speciaal ontwikkeld voor de verzorging van uw NoNoise Gehoorbeschermers. Regelmatige verzorging zal de levensduur van uw gehoorbeschermers verlengen en een kristalheldere weergave garanderen.

### GEBRUIKSAANWIJZING

Spuit een kleine hoeveelheid vloeistof op de gehoorbeschermer. Veeg dit vervolgens met een doekje schoon en droog (zie gebruiksaanwijzing op de flacon). Reinigingsdoekjes gebruiken bij hardnekkig vuil. Gebruik het blauwe blaasbalgje om het inwendige kanaal van de gehoorbeschermer droog te blazen. Als u het blaasbalgje gebruikt, blaas dan **alleen** in de grotere opening van de gehoorbeschermer, anders zou het filter kunnen verschuiven.

## BRUISTABLETTE

### GEBRUIKSAANWIJZING

1. Mandje uit de reinigingsbeker nemen.
2. Reinigingstablet in beker leggen.
3. Beker met water vullen.
4. Leg de gehoorbeschermers in het mandje en plaats het geheel in de reinigingsbeker.
5. Tijdsduur: minimaal 15 min. tot meerdere uren (evt. gehele nacht).
6. Mandje met gehoorbeschermers uit de beker nemen.
7. Met water afspoelen.
8. Gehoorbeschermers goed drogen.

### ADVIES

- Per reiniging een nieuw tablet gebruiken.
- Gehoorbeschermers minimaal 1 x per 2 weken reinigen.
  - Onze reinigings producten zijn milieuvriendelijk en irriteren de huid niet.
- Niet om in te nemen, buiten bereik van kinderen houden.
  - Let op dat u het filter niet uit zijn behuizing verschuift tijdens het gebruik van het blaasbalgje.
- Bij verslikking: Bij bewustzijn de mond met water spoelen en veel water drinken.
- Geen braken veroorzaken. Direct een arts waarschuwen.

VERVAARDIGD VOOR EMMA HBC, NONOISE DIVISION  
HEERBAAN 15B, 6097 AV HEEL, NL  
DOOR KENDAL-GEHOORBESCHERMING BV, NL (ISO9001:2008)